

3 korzyści

1 Zawartość alkoholu poniżej 50%
zapewnia maksymalną kompatybilność materiałową i skórą.

2 Ergonomiczny kształt butelki
umożliwia łatwą i bezpieczną aplikację.

3 Testowany w najbardziej wymagających warunkach
gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa nawet w przypadku intensywnych zanieczyszczeń organicznych.

PROSEPT® Spray

Wydajny roztwór do skutecznej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

PROSEPT® Spray to gotowy do użytku produkt przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych, takich jak stoły do badań, unity stomatologiczne, urządzenia medyczne i instrumenty nieinwazyjne. Dzięki sprawdzonemu połączeniu etanolu i propan-1-olu, PROSEPT® Spray zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie, wynoszącym jedynie 60 sekund. Niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO) poniżej 50% zapobiega pękaniu dezynfekowanych powierzchni oraz zmniejsza dolegliwości skórne i oddechowe, występujące często w przypadku preparatów dezynfekcyjnych o wysokiej zawartości alkoholu. PROSEPT® Spray nie zawiera aldehydów i fenoli, ma przyjemny cytrynowy zapach oraz jest całkowicie biodegradowalny.

► Łatwy w użyciu zgodnie z prostymi wytycznymi:

1. Ze względów bezpieczeństwa należy nosić rękawice ochronne jednorazowego użytku. Podczas dezynfekcji metodą rozpylania nosić maskę ochronną.
2. Dezynfekowaną powierzchnię lub wyrób medyczny należy dokładnie zwilżyć preparatem dezynfekującym.
3. Przestrzegać czasu działania.
4. W razie konieczności osuszyć powierzchnię czystą ściereczką jednorazowego użytku.
5. Przed pierwszym zastosowaniem wykonać próbę materiałową, nakładając produkt na niewielki obszar dezynfekowanej powierzchni.
6. Stosować wyłącznie z materiałami kompatybilnymi z alkoholem.

► Dlaczego PROSEPT® Spray jest tak skuteczny?

Zawartość w 100 g: 20 g etanolu, 28 g 1-propanolu, 0,056 g czwartorzędowych związków amoniowych.

Właściwości fizyczne: Przezroczysta, bezbarwna ciecz o cytrynowym zapachu..

Gęstość (20 °C): 0.9 g/ml (g/cm³)

Wartość pH: neutralna

► Ważne ze względów bezpieczeństwa

Produkt łatwopalny. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

► Powierzchnia wolna od zarazków w zaledwie kilka sekund

Bakteriobójczy / Grzybobójczy (bez obciążenia organicznego)	30 sekund
(z obciążeniem organicznym)	60 sekund
Gruźliczobójczy (<i>M. terrae</i>)	60 sekund
Prątkobójczy (<i>M. avium</i>)	60 sekund
WZW typu B ¹⁾ / HIV	30 sekund
BVDV / WZW typu C ²⁾	30 sekund
Wirus opryszczki	30 sekund
Wirus grypy A	60 sekund
Adenowirus / Papowawirus	60 sekund


1) Test na obecność przeciwciał HBsAg; 2) Test na obecność wirusa zastępczego BVD

► Doskonałe referencje Eksperti polecają

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin, D, 2001, 2006; Dr. J. Steinmann, Bremen, D, 2001, 2005; Labor L+S AG, A. Matin, Bad-Bocklet-Grossenbach, D, 2008

Zgodność z metodami standardowymi DGHM, normami EN 1040, EN 1275 (*C. albicans*)



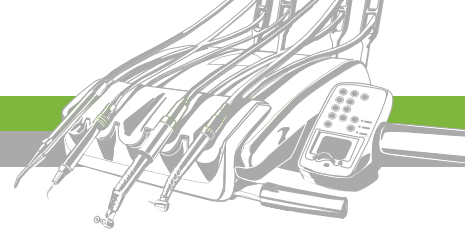

PROSEPT® Spray

Zastosowanie

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do szybkiej i wszechstronnej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, tj. powierzchni medycznych, małych przyrządów, stołów do badań, instrumentów nieinwazyjnych, sprzętu RTG, jak również prostnic i kątnic.

Dezynfekcja powierzchni

Kiedy stosować

- ▶ Po każdym zabiegu należy dezynfekować wszystkie powierzchnie w promieniu 2 m od fotela dentystycznego, w tym powierzchnie zewnętrzne prostnic i kątnic.
- ▶ W przypadku widocznego zanieczyszczenia krwią lub innym materiałem potencjalnie zakaźnym, należy niezwłocznie oczyścić i poddać dezynfekcji wszystkie zanieczyszczone obszary i przedmioty.
- ▶ Raz dziennie dezynfekować wszystkie powierzchnie w gabinecie zabiegowym.

Ważne wytyczne

- ▶ W miarę możliwości przecierać dezynfekowane powierzchnie (unikać rozpylania), aby zapobiec tworzeniu się aerozoli.
- ▶ Rozpylenie preparatu dezynfekującego ograniczyć do powierzchni, których nie można zdezynfekować poprzez przecieranie szmatką. Należy w miarę możliwości usuwać lub osłaniać niedostępne powierzchnie.
- ▶ Stosować wyłącznie z materiałami kompatybilnymi z alkoholem.
- ▶ Przed pierwszym zastosowaniem wykonać próbę materiałową, nakładając produkt na niewielki obszar dezynfekowanej powierzchni.
- ▶ Należy unikać stosowania jednorazowych ściereczek z papieru makulaturowego, które są często siedliskiem drobnoustrojów.

Wskazówki

- ▶ Aby ułatwić dezynfekcję, należy dbać o czystość w gabinecie zabiegowym.
- ▶ Aby uzyskać optymalny komfort przecierania dezynfekowanych powierzchni, PROSEPT® Spray stosować razem z chusteczkami PROSEPT® Wipes.

Materiały i wyposażenie

- ▶ Rękawice jednorazowego użytku
- ▶ Maski ochronne
- ▶ Ściereczki jednorazowe lub gotowe do użycia chusteczki PROSEPT® Wipes



1. Ze względów bezpieczeństwa nosić rękawice ochronne jednorazowego użytku. Podczas dezynfekcji metodą rozpylania nosić maskę ochronną.




2. Nanieść PROSEPT® Spray na suchą ściereczkę jednorazowego użytku lub chusteczkę PROSEPT® Wipe. Aby uniknąć tworzenia się aerozoli, preparat rozpylić na ściereczkę z małej odległości lub zastosować butelkę z zamknięciem na zatrzask.



3. Podczas przecierania dokładnie zwilżyć dezynfekowaną powierzchnię lub wyrób medyczny.



4. Odczekać wymagany czas działania. Preparat powinien pokrywać dezynfekowaną powierzchnię przez cały czas działania. W razie konieczności ponownie zwilżyć preparatem dezynfekującym.

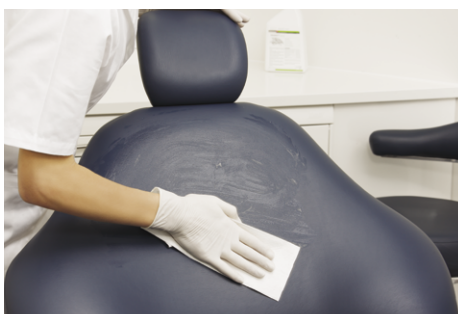

5. W razie konieczności przetrzeć powierzchnię suchą ściereczką jednorazowego użytku.