

MYCIE I DEZYNFEKCJA SYSTEMÓW SSĄCYCH I SPLUWACZEK

Dekaseptol® Gel

Glukoprotamina - opatentowana substancja aktywna

Strefa niebezpieczna: systemy ssące i spluwaczka. Tu gromadzi się brud i rozwijają mikroorganizmy chorobotwórcze, stanowiąc zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego tak ważne jest dbanie o higienę tych obszarów.

- ▲ Gotowy do użycia
- ▲ W postaci żelu
- ▲ Szybki i skuteczny w działaniu
- ▲ Na bazie glukoprotaminy



Dekaseptol® Gel

Glukoprotamina - opatentowana substancja aktywna

Dlaczego Dekaseptol® Gel?

Preparat jest aktywny wobec bakterii (łącznie z Tbc), drożdży, grzybów i wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HC V, HIV) (testowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha), a także wirusa Adeno nawet w obecności silnych zanieczyszczeń. Produkt jest w postaci żelu gotowy do użycia, gwarantuje bardzo dobre właściwości myjące i krótki czas działania. Dozowanie za pomocą specjalnego aplikatora-dozownika z pompką ułatwia stosowanie. Produkt posiada świeży zapach i nie zawiera aldehydów, fenoli ani chloru. Został opracowany wspólnie przez firmy KaVo i Ecolab oraz przetestowany wg metodyki DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii) – umieszczony na liście VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej).

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- ▲ Bezpieczna, pewna dezynfekcja.
- ▲ Łatwe i wygodne dozowanie, możliwość natychmiastowego użycia bez konieczności przygotowywania roztworu roboczego, brak ryzyka popełnienia błędu przy dozowaniu.

- ▲ Idealnie pokrywa wewnętrzne ścianki przewodu ssaka i ślinociągu na całej długości.
- ▲ Oszczędność czasu.
- ▲ Zapobiega zapychaniu systemów ssących, usuwa nawet stare osady.
- ▲ Nie uszkadza mytych i dezynfekowanych tworzyw.
- ▲ Łatwy w użyciu, oszczędny – idealnie odmierzona potrzebna ilość preparatu.
- ▲ Stwarza przyjemne warunki pracy, działa dezodoryzująco.
- ▲ Produkt przyjazny dla środowiska naturalnego, łatwo ulega biodegradacji zgodnie z wymogami testu OECD.
- ▲ Gwarancja jakości produktu potwierdzona przez wiodącego producenta unitów.
- ▲ Najlepsze z możliwych zabezpieczeń.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	CZAS DZIAŁANIA
Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (warunki czyste i brudne), bez udziału mechaniki	15 min.
Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV) zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) metodologia 01/2004	15 min.
Adeno	15 min.
Działanie prątkobójcze wg DGHM (M.terrae)	2 h
Parametry wg. metodyki PZH (B, F)	1 h

W CELU ŁATWEGO I HIGIENICZNEGO DOZOWANIA ZALECAMY STOSOWANIE POMOCY DOZUJĄCYCH

Aplikator-dozownik na butelkę 10017245
Kranik na kanister 10005085



CE 0297

Ecolab Healthcare Europe
Clean. Safe. Healthy.

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen, Zurich

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
www.ecolab.pl

© Ecolab MAY 2013. All rights reserved.

MYCIE I DEZYNFEKCJA SYSTEMÓW SSĄCYCH I SPLUWACZEK

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Preparat przeznaczony do dezynfekcji i mycia stomatologicznych systemów ssących (ssaki, ślinociągi) oraz spluwaczek.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Produkt gotowy do użycia – nie rozcieńczać! W przypadku zmętnienia produktu wstrząsnąć przed użyciem.

- Ślinociąg: zassać 200 ml wody, a następnie jedną porcję tj. 15 ml produktu Dekaseptol Gel, pozostawić na min. 15 minut i przepłukać wodą
- Ssak: zassać 200 ml wody, następnie dwie porcje tj. 30 ml produktu Dekaseptol Gel, pozostawić na min. 15 minut i przepłukać wodą
- Spluwaczka: wlać jedną porcję tj. 15 ml produktu Dekaseptol Gel do spluwaczki, rozprzecznić za pomocą szczotki, pozostawić na min. 15 minut i spłukać strumieniem wody..

SKŁAD

100 g zawiera jako substancje czynne: 0,1 g glukoprotaminy, 0,1 g chlorku benzyloalkiloamoniowego, 0,25 g chlorku dimetyliodkioloamoniowego.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Butelka 1 l + 1 aplikator-dozownik	3 szt.	3006040
Kanister 6 l	1 szt.	3006050

OPINIE

Liczne badania mikrobiologiczne, wirusologiczne, toksykologiczne i ekologiczne - na Państwa prośbę chętnie udostępnimy opinie.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie.
Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu.

ECOLAB®