

# ID 213

## Dezynfekcja instrumentów



ID 213 to bardzo skuteczny, niezawierający aldehydów koncentrat do czyszczenia przyrządów i ednoczesnej dezynfekcji oraz instrumentów wykorzystywanych w gabinetach stomatologicznych (lusterek, sond, pęset, szczypiec itp.). Dodatkowo preparat nadaje się do czyszczenia obrotowych i dezynfekcji instrumentów wykonanych z materiałów wrażliwych na działanie alkoholu i związków zasadowych

**Skład:** 100 g ID 213 zawiera 15 g 1,3-dwuaminy 3-aminopropylododecylo-propanowej, 12,5 g chlorku alkilo-benzylo-dwumetylo-amonowego, niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki kompleksotwórcze, kumaryny, cytronellol, Perfumy i środki pomocnicze.

**Zakres działania:** Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom gruźlicy, grzybobójcze, wirusobójcze (wirusy otoczkowe, takie jak wirusy krowianki, łącznie z HBV, HCV i HIV<sup>1)</sup>, oraz wirusy bezotoczkowe takie jak adenowirusy, polyomawirusy SV 40, norowirusy, poliovirusy). Lista VAH. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytutu Roberta Kocha) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

**Zastosowanie:** Do czyszczenia i dezynfekcji stosować 2-procentowy roztwór preparatu ID 213 przez 60 minut (patrz tabela w „DE”). Przykładową dawkę 20 ml ID 213 odmierzyć miarką znajdującą się w zamknięciu (zaznaczenie wskazuje objętość 20 ml), a następnie dopełnić wodą do 1 litra. Preparat ID 213 można również stosować do kąpeli ultradźwiękowej. Zaleca się sporządzenie roztworu 2-procentowego i czas kąpeli 2 minut, z bakteriami gruźlicy Tb 2 % i 30 min. Nie wolno mieszać preparatu ID 213 z innymi środkami, powszechnie dostępnymi w handlu. Roztwór użytkowy przygotować z wykorzystaniem ciepłej wody. Zdezynfekowane instrumenty wyjąć z kąpeli, przepłukać pod bieżącą wodą i w razie konieczności wysterylizować. Okres przydatności roztworu do użycia wynosi 14 dni. W wypadku wzmożonego kontaktu instrumentów z krwią, śliną itp. zaleca się wymieniać roztwór dwa lub trzy razy w tygodniu. Dalsze wskazówki patrz także – informacja o produkcie w Internecie.

**Wskazówki:** Preparatu ID 213 nie wolno mieszać z substancjami zawierającymi aldehyd, np. dwualdehydem glutaminowym czy glioksalem. Kontakt tych substancji z ID 213 może powodować czerwono-brązowe przebarwienia. Przed pierwszym użyciem preparatu ID 213 dokładnie wyczyścić skrzynkę z instrumentami.

# ID 213

## Dezynfekcja instrumentów

Niebezpieczeństwo. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

CE 0297