

MD 550

Oczyszczacz do spluwaczki



Środek MD 550 jest gotowym do użycia, specjalnym preparatem do czyszczenia i pielęgnacji spluwaczek stomatologicznych w unitach dentystycznych oraz umywalk, WC, płytek ceramicznych itp. Środek MD 550 usuwa pozostałości wapnia, krwi, tabletek barwiących, materiałów wyciskowych itp.

Skład: 100 g MD 550 zawiera 40 g etanolu, < 1 g związków powierzchniowo czynnych, < 5 g kwasów organicznych, substancje pomocnicze, salicynian benzylu, wodę.

Zakres działania: Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 13624.

Zastosowanie: MD 550 należy stosować w postaci nierozcieńczonej. W celu otwarcia bezpiecznego zamknięcia należy ścisnąć jego gładkie powierzchnie i przekręcić. Wlać nieco środka MD 550 do spluwaczki stomatologicznej i rozprowadzić gąbką lub szczotką, równomiernie dociskając. Pozostawić na krótki czas, aby środek zaczął działać, a następnie spłukać wodą. Stosować środek MD 550 w zależności od potrzeb, wieczorem koniecznie przed dezynfekcją instalacji odsysającej.

Wskazówki: Temperatura zapłonu 23 °C. Należy zachować ostrożność w kontaktach z materiałami wrażliwymi na alkohol (np. ze szkłem akrylowym). Do mycia miski spluwaczki nie stosować pianących ani gruboziarnistych środków dezynfekcyjnych lub czyszczących.

Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

CE 0297