

ID 212 forte

Dezynfekcja instrumentów



ID 212 forte to bardzo skuteczny, niezawierający aldehydów koncentrat do jednoczesnej dezynfekcji i czyszczenia przyrządów oraz instrumentów wykorzystywanych w gabinetach stomatologicznych (lusterek, sond, pęset, szczypiec itp.). Dodatkowo preparat nadaje się do dezynfekcji i czyszczenia obrotowych instrumentów wykonanych z materiałów wrażliwych na działanie alkoholu i związków zasadowych.

Skład: 100 g ID 212 forte zawiera 12,5 g chlorku alkilo-benzylodwumetylo-amonowego, 6 g 1,3-dwuaminy 3-aminopropylododecylo-propylowej, 4 g dwuocianu alkilo-dwuamino-propylguanidynowego, 5-15 g niejonowe związki powierzchniowo czynne, < 5 g czynnik kompleksotwórczy, substancje pomocnicze, salicynian benzylu, metylopropional butylofenylu, linalol.

Zakres działania: Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom gruźlicy, drożdżakobójcze, w ograniczonym stopniu wirusobójcze (wirusy otoczkowe, takie jak wirusy krowianki, łącznie z HBV, HCV i HIV¹⁾ oraz wirusy bezotoczkowe takie jak adenowirusy, norowirusy). Lista VAH. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476.

¹⁾ Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytutu Roberta Kocha) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Zastosowanie: Do czyszczenia i dezynfekcji stosować 2-procentowy roztwór preparatu ID 212 forte (20 ml ID 212 forte dopełnić wodą do 1 litra), zanurzając w nim instrumenty na 5 minut zgodnie z VAH, pro bakterie vč. Tbc 2 % a 60 minut (patrz tabela w DE). Preparat ID 212 forte można również stosować do kąpieli ultradźwiękowej. Zaleca się sporządzenie roztworu 2-procentowego i czas kąpieli 1 minutę, z bakteriami gruźlicy Tb 4 % i 30 min. Nie wolno mieszać preparatu ID 212 forte z innymi środkami, powszechnie dostępnymi w handlu. Roztwór użytkowy przygotować z wy korzystaniem ciepłej wody. Zdezynfekowane instrumenty wyjąć z kąpieli, przepłukać pod bieżącą wodą i w razie konieczności wysterylizować. Okres przydatności roztworu do użycia wynosi 7 dni. W wypadku wzmożonego kontaktu instrumentów z krwią, śliną itp. zaleca się wymieniać roztwór dwa lub trzy razy w tygodniu. Dalsze wskazówki patrz także – informacja o produkcie w Internecie.

Wskazówki: Preparatu ID 212 forte nie wolno mieszać z substancjami zawierającymi aldehyd, np. dwualdehydem glutaminowym, glioksalem. Kontakt tych substancji z ID 212 forte może powodować czerwono-brązowe przebarwienia. Przed pierwszym użyciem preparatu ID 212 forte dokładnie wyczyścić skrzynkę z instrumentami. Preparaty do dezynfekcji instrumentów wytwarzają pianę i z tego względu nie mogą mieć styczności z aparaturą

ID 212 forte

Dezynfekcja instrumentów

ssącą. Piana może spowodować uszkodzenie aparatury!

Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/ pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Zawiera LINALOOL. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

CE 0297