

3 korzyści

1

Duża moc czyszcząca
usuwa nawet najtrudniejsze zanieczyszczenia, eliminując konieczność dodatkowego czyszczenia ręcznego.

2

Wydajny koncentrat
oszczędność do 200%.

3

Dodatkowe zabezpieczenie
wykazuje aktywność grzybo- i bakterio-bójczą.

PROSEPT® Sonic

Wysokowydajny koncentrat do dokładnego czyszczenia zanieczyszczonych instrumentów w urządzeniach ultradźwiękowych.

PROSEPT® Sonic to niepieniący koncentrat na bazie wysokowydajnych, aktywnych składników zasadowych, przeznaczony do skutecznego czyszczenia instrumentów dentystycznych i chirurgicznych, tj. narzędzi ścierających, pistoletów do amalgamatu, łopatek, dźwigni stomatologicznych, kleszczy ekstrakcyjnych oraz innych precyzyjnych instrumentów. Produkt z powodzeniem usuwa osady, pozostałości tkanki, krew, resztki białka, a nawet cement i gips. Zawarte substancje dezynfekujące obniżają ilość patogenów na instrumentach, ograniczając ryzyko infekcji krzyżowej. PROSEPT® Sonic nie zawiera aldehydów i fenoli. Specjalnie zaprojektowana nakrętka z miarką o wymaganej jednostce objętości 20 ml umożliwia łatwą obsługę i dużą dokładność dozowania, dzięki czemu produkt można stosować w bardzo wydajny i ekologiczny sposób. PROSEPT® Sonic można stosować w procedurach zanurzeniowych bez ultradźwiękowej kąpieli czyszczącej. PROSEPT® Sonic ulega biodegradacji.

► Dlaczego

PROSEPT® Sonic jest tak skuteczny?

Zawartość w 100 g: 16 g wodorotlenku potasu, środek kompleksujący, specjalne środki powierzchniowo-czynne.

Właściwości fizyczne: Przezroczysta, bezbarwna lub jasnożółta ciecz.

Gęstość (20°C): 1,2 g/ml (g/cm³)

Wartość pH: 5% roztwór roboczy: 13,0

► Powierzchnia wolna od zarazków w kilka minut

Bakteriobójczy (EN 1040)	5% w 15 min
Grzybobójczy (EN 1275, A. niger)	5% w 30 min

► Łatwe zastosowanie

zgodnie z prostymi wytycznymi:

1. Ze względów bezpieczeństwa nosić rękawice gospodarcze i okulary ochronne.
2. Przygotować roztwór roboczy zgodnie z instrukcją na etykiecie. Użyć podziałki objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić właściwe dozowanie.
3. Całkowicie zanurzyć instrumenty.
4. Przestrzegać czasu działania.
5. Po zanurzeniu dokładnie spłukać instrumenty wodą i osuszyć.
6. Roztwór roboczy wymieniać 2-3 razy w tygodniu, w zależności od stopnia zabrudzenia. Roztwór najlepiej przygotowywać codziennie.
7. Przed pierwszym zastosowaniem wykonać próbę materiałową.
8. Nie stosować w przypadku instrumentów kodowanych kolorystycznie oraz instrumentów wykonanych w całości lub częściowo z / przy użyciu naturalnego włosia, nylonu lub aluminium.

► Ważne

ze względów bezpieczeństwa

Powoduje poważne oparzenia. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.


► Doskonałe referencje

Eksperti polecają

Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, D, 2000

Zgodność z normami EN 1040 i EN 1275



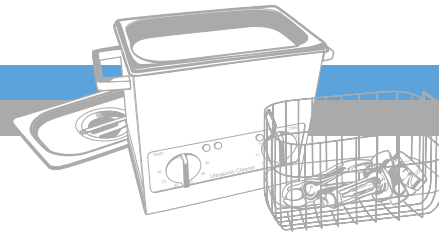

PROSEPT® Sonic

Zastosowanie

Koncentrat w płynie do dokładnego czyszczenia zanieczyszczonych instrumentów dentystycznych i chirurgicznych, tj. narzędzi ścierających, łopatek, dźwigni stomatologicznych, pistoletów do amalgamatu lub kleszczy ekstrakcyjnych w kąpeli ultradźwiękowej.

Czyszczenie instrumentów

Kiedy stosować

- Mocno zanieczyszczone instrumenty należy oczyścić bezpośrednio po dezynfekcji.

Ważne wytyczne

- Niniejszy produkt ma ograniczone spektrum działania. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wcześniejszą dezynfekcję instrumentów preparatem PROSEPT® Instru.
- Nie stosować w przypadku komponentów z naturalnego włosa, nylonu, aluminium ani instrumentów kodowanych kolorystycznie.
- Nie stosować szczotek metalowych, ponieważ mogą powodować uszkodzenie stopu instrumentu.
- Maksymalny czas przechowywania roztworu roboczego wynosi 7 dni. Zaleca się codzienną wymianę roztworu, w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Materiały i wyposażenie

- Rękawice gospodarcze
- Okulary ochronne
- Urządzenie ultradźwiękowe
- Szczypce



1. Założyć rękawice gospodarcze i okulary ochronne.



2. Przygotować roztwór czyszczący do kąpeli. Do przygotowania 3 litrów roztworu (5%) użyć 150 ml (7,5 nakrętki) koncentratu.



3. Umieścić zdezynfekowane instrumenty w kąpeli ultradźwiękowej PROSEPT® Sonic.



4. Odczekać do zakończenia procedury ultradźwiękowej i upływu wymaganego czasu działania.



5. Wyjąć ociekacz z urządzenia ultradźwiękowego.
6. Dokładnie spłukać instrumenty wodą.



7. Sprawdzić, czy na instrumentach nie występują widoczne zanieczyszczenia.



8. W razie konieczności użyć szczotki do ręcznego czyszczenia końcowego. Nie stosować szczotek metalowych, ponieważ mogą powodować uszkodzenie stopu instrumentu.



9. Zdezynfekować instrumenty preparatem PROSEPT® Instru i poddać sterylizacji w autoklawie.