

# MD 520

## Dezynfekcja wycisków i odlewów



MD 520 to bardzo skuteczny, niezawierający formaldehydu roztwór przeznaczony do dezynfekcji oraz czyszczenia skażonych wycisków (alginianów, silikonów, masy polieterowej, wielosiarczków, koloidów w roztworze wodnym) i tyłek wyciskowych w aparatach dezynfekujących Hygojet. MD 520 nadaje się również do dezynfekcji zanurzeniowej i czyszczenia w skrzynce/puszcze dezynfekującej.

**Skład:** 100 g MD 520 zawiera 0,5 g dwualdehydu glutarowego, 0,25 g chlorku alkilo-benzylodwumetylo-amonowego, < 5 g niejonowe związki powierzchniowo czynne, czynnik kompleksotwórczy, substancje pomocnicze.

**Zakres działania:** Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom gruźlicy, drożdżakobójcze, wirusobójcze (wirusy otoczkowe, takie jak wirusy krowianki, łącznie z HBV, HCV i HIV<sup>1)</sup> oraz wirusy bezotoczkowe takie jak adenowirusy, poliovirusy, norowirusy). Lista VAH. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 14476.

1) Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytutu Roberta Kocha) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

**Zastosowanie:** MD 520 należy stosować w postaci nierozcieńczonej. W aparacie Hygojet jednorazowo płukać wodą maksymalnie sześć odlewów, jeden po drugim, każdy odlew przez 10 sekund (5 sekund na każdą stronę). Następnie każdy odlew spryskać równomiernie z obu stron środkiem MD 520 i odłożyć do urządzenia. Czas działania wynosi 10 minut (patrz tabela w DE). Ścisłe przestrzegać instrukcji dołączonej do urządzenia. Podczas dezynfekcji zanurzeniowej i czyszczenia w puszcze dezynfekującej na uchwycie zawieszać maksymalnie 2 odlewy. Stosując skrzynkę dezynfekującą, można układać w niej do 6 odlewów jednocześnie. Wymagany czas czyszczenia wynosi jedynie 5 minut (patrz tabela w DE). Roztwór wymieniać maksymalnie co 50 odlewów, przynajmniej raz w tygodniu. Zdezynfekowane elementy służyć dodatkowo wodą i w razie konieczności wysuszyć strumieniem powietrza.

**Wskazówki:** Badania naukowe potwierdzają, że prawidłowe stosowanie preparatu MD 520 w aparacie Hygojet oraz do dezynfekcji zanurzeniowej w skrzynce/puszcze dezynfekującej wpływa pozytywnie na trwałość kształtu i prawidłowe dopasowanie form gipsowych. Dla bezpieczeństwa zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie kontroli pod kątem zastosowań preparatu do celów specjalnych. Napoczęte butelki zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować

# MD 520

## Dezynfekcja wycisków i odlewów

podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

CE 0297