



Instrukcja konserwacji instalacji ssącej z pomocą Orotol® plus & MD 555 cleaner



Codzienna dezynfekcja z pomocą Orotol® plus

Koncentrat w płynie Orotol® plus to idealne rozwiązanie do jednoczesnej dezynfekcji, dezodoryzowania, czyszczenia i konserwacji wszystkich instalacji ssących i separatorów amalgamatu. Aplikacja odbywa się po zakończeniu pracy, w przypadku większego obciążenia 2 x dziennie (w południe i wieczorem).

Dezynfekcja
Dezynfekcja

1 Czyszczenie wstępne




Odessać 2 litry wody

2 Dozowanie 2 %



Przygotowanie roztworu 2 %:
1 litr wody + 20 ml Orotol plus

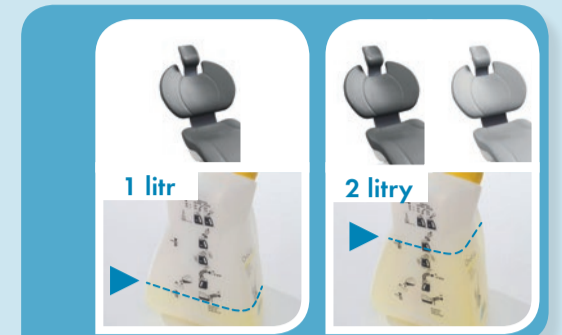

Na unit zabiegowy:
1 litr wody + 1 nakrętka Orotol® plus (20 ml)
Przy 2 unitach zabiegowych:
2 litry wody + 2 nakrętki Orotol® plus (40 ml)

3 Instalacje ssące



Nasadzić węże ssące, odessać 1 litr roztworu na unit zabiegowy

4 Dezynfekcja spluwaczki



Co najmniej 250 ml roztworu na spluwaczkę

5 Czas działania



Pozostawić co najmniej na 1 godzinę. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, w ograniczonym stopniu wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, norowirusy)

6 Płukanie unitu zabiegowego



Przy ponownym uruchomieniu odessać 2 litry wody

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

Cotygodniowe czyszczenie z pomocą MD555 cleaner

MD 555 cleaner to specjalny preparat czyszczący do instalacji ssących i separatorów amalgamatu. Cechuje go wysoka skuteczność w usuwaniu złożeń, osadów i kamienia. Aplikacja odbywa się 1 do 2 razy w tygodniu (np. we wtorek i czwartek), w przypadku większego obciążenia codziennie w czasie przerwy obiadowej.

Środek czyszczący
Cleaner

1 Czyszczenie wstępne




Odessać 2 litry wody

2 Dozowanie 5 %



Przygotowanie roztworu 5 %:
1 litr wody + 50 ml MD 555 cleaner

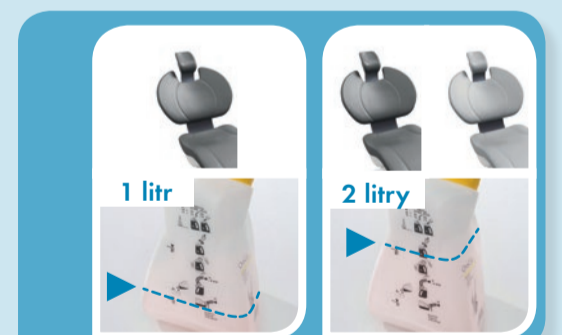

Na unit zabiegowy:
1 litr wody + 2,5 nakrętki MD 555 cleaner (50 ml)
Przy 2 unitach zabiegowych:
2 litry wody + 5 nakrętek MD 555 cleaner (100 ml)

3 Instalacje ssące



Nasadzić węże ssące, odessać 2 lub 1 litr roztworu

4 Czyszczenie spluwaczek



Co najmniej 250 ml roztworu na spluwaczkę

5 Czas działania



Pozostawić na 30 do 120 minut

6 Płukanie unitu zabiegowego



Przy ponownym uruchomieniu odessać 2 litry wody

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN